

Prevention
is the cure

DERMAPAD*

Suunniteltu auttamaan
painehaavojen ehkäisyssä^{1,2,3,4}

smith&nephew

DERMAPAD[®]

Polymer Gel Pad

DERMAPAD-pehmustetta voidaan käyttää:



Havaittavissa olevien
painehaavojen aluissa



Hoitolaitteiden alla
ehkäisemässä vaurioita



Hiljattain parantuneissa
painehaavoissa




Alueilla, joissa on
painehaavariski



Tilastiedot

| Tuotenumero | Koko | Kpl/ltk | Kuljetus- pakkaus ltk |
|-------------|---|---------|--------------------------|
| 66801315 | DERMAPAD levy 10 x 10 x 0,3 cm | 5 | 12 |
| 66801316 | DERMAPAD levy 10 x 10 x 1,2 cm | 5 | 12 |
| 66801317 | DERMAPAD levy 20 x 20 x 0,3 cm | 2 | 10 |
| 66801318 | DERMAPAD levy 20 x 20 x 1,2 cm | 2 | 6 |
| 66801319 | DERMAPAD Heel | 2 | 12 |
| 66801320 | DERMAPAD Large Heel | 2 | 12 |
| 66801322 | DERMAPAD Sacrum/Ankle Wrap | 1 | 10 |
| 66801323 | DERMAPAD Strip/liuska 50 x 2,5 x 0,3 cm | 5 | 12 |
| 66801324 | DERMAPAD Strip/liuska 30 x 5 x 0,3 cm | 5 | 12 |

DERMAPAD[®]* käyttöohje

 Käytä ainoastaan ehjällä iholla

 Voidaan leikata³

 Voidaan kiinnittää toissijaisella silikoniteipillä

 Voidaan pestä ja käyttää uudelleen samalla potilaalla⁴

 Säästä pakkaus säilytystä varten



Heel - Kantapääpehmustetta voidaan käyttää istuvilla potilailla pitkä sivu jalkaterään päin tai vuodepotilailla pitkä sivu kantapäästä ylöspäin. Sitä voidaan käyttää myös kyynärpäissä tai polvissa. Saatavilla myös suurempi koko alueille, joissa on turvotusta ja/tai nestekertymää.



Sacrum - Alunperin suunniteltu sakraalialueelle. Pehmuste voidaan pitää paikallaan vaipan tai alushousujen avulla. Muita yleisiä käyttöpaikkoja ovat nilkan tai olkapään alueet, lonkka tai takaraivo.



Levy - Levyt ovat hyvin monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää vuodepotilailla jalan tai pään alla, polvien välissä tai leuan alla. Niitä voidaan käyttää yksinkerroin tai taitettuna käsin kontraktuurissa, jolloin niistä saadaan ihanteellista apua aivohalvauksentoutuksessa. Isoa levyä voidaan käyttää jalkapöydän ympärille pyörytettyinä tai olkapään alla vuodelevon aikana.



Liuskat - Liuskat ovat ihanteellisia vaikeimmilla alueilla, kuten sormien ja varpaiden välissä, korvan takana tai nenän päällä happimaskin alla. Leveämpää liuskaa käytetään myös selkärangan alueella.



*DERMAPAD is branded as ADERMA[®] in the UK. Where ever DERMAPAD is referenced, the data was generated using ADERMA.

Viitteet

1. Fletcher J ADERMA Range A flexible way to prevent pressure ulcers Wounds UK-2009 54136-9.pdf.
2. Leonard S 2008 .pdf.
3. Test report CCA2109 R2a.pdf.
4. Technical study report CCA2109 R3.pdf.

Edistynyt haavanhoito

Smith & Nephew Oy
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

Puh. 0207 866 300
Fax 0207 866 320

www.smith-nephew.com/wound

[®]Smith & Nephew'n rekisteröity tuotemerkki
[™]All trademarks acknowledged
© Smith & Nephew elokuu 2013
13-08060-FI