

**B | BRAUN**

B Braun Medical Oy  
Huopalahdentie 24  
FIN-00350 HELSINKI

Puh: 020 1772 700  
Fax: 020 1772 720  
www.bbraun.com

Säilytä pakkauksessa pitkällään kuivassa huoneenlämmössä

Valmistuttaja:  
TG Eakin Limited  
15 Ballystockart Road  
Comber, Country Down  
Northern Ireland  
BT23 5QY



**EAKIN  
AVANNE-  
TUKIVYÖT**

Miellyttävä vatsan alueen tuki  
avanteille ja tyrille



**EAKIN**<sup>®</sup>  
www.eakin.co.uk



KEVYT • HENGITTÄVÄ • JOUSTAVA • KEVYT HENGITTÄVÄ • JOUSTAVA

KEVYT • HENGITTÄVÄ • JOUSTAVA • KEVYT HENGITTÄVÄ • JOUSTAVA

Eakin avannetukivyöt on valmistettu ainutlaatuisesta Isoflex materiaalista.

Isoflex on kehitetty erityisesti avanneleikatuille tukemaan vatsan aluetta tasaisesti. Tämä mahdollistaa täydellisen tuen avanteen lähelläolevalle tyrälle antaen kuitenkin joustavuutensa ansiosta avanteen toimia normaalisti.

Isoflex muotoutuu vartalon liikkeiden mukaisesti ja näin tukivyötä voi pitää pitkiäkin aikoja tarvittaessa.



## EAKIN AVANNETUKIVYÖT:

- Vatsan alueen tukemiseen fyysikaalisten aktiviteettien kuten: kotitöiden, puutarhahoidon, nostamisen, kävelyn ja urheilun aikana.
- Kehitetty yhdessä avannehoitajien kanssa tukemaan avanteita ja tyriä.
- Kevyt, hengittävä materiaali mahdollistaa miellyttävän tuen myös kosteissa ja kuumissa olosuhteissa.
- Ihonvärinen materiaali ja helppo Velcro tarrakiinnitys.



## OIKEAN KOON VALINTA

1. Makaa tukevalla alustalla ja anna tyrän asettua normaaliin asentoonsa vatsan ollessa mahdollisimman litteä.
2. Mittaa huolellisesti mittanauhaa apuna käyttäen vatsan ympärys tyrän ja avanteen kohdalta.
3. Vertaa samaasi lukua allaolevaan taulukkoon saadaksesi oikean koon ja tilausnumeron.
4. Mikäli kokosi on asteikon rajalla, valitse pienempi koko.
5. Valitse joko 20cm:n tai 26cm:n koko omien tarpeidesi mukaan.

Koko	Mitta	20cm leveä vyö	26cm leveä vyö
S	75-90cm	839051	839061
M	90-105cm	839052	839062
L	105cm-120cm	839053	839063
XL	120cm-135cm	839054	839064