

TILAUSTIEDOT

	Koko	Pakkauskoko	Tuotenumero
Iso Surround™ ihonsuoja	98 mm	10	839011
Pieni Surround™ ihonsuoja	48 mm	20	839012



eakin® 



eakin® 

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical Oy
Huopalahdentie 24
FI-00350 Helsinki
Puh 020 1772 700
myynti.fi@bbraun.com
www.bbraun.fi

ESURELY/ZNB (FI)
Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

Surround™
IHONSUOJA

HYVÄSTIT KIVULLE

Surround™ ihonsuoja tarjoaa täydellisen ihonsuojan, pitäen veden ja bakteerit poissa iholta. Ihonsuoja perustuu samoihin ainesosiin kuin Eakin **Cohesive®** renkaat, tarjoten näin 3- osaisen suojan:

- 1) Imee eritettä ja pitää ihon kuivana
- 2) Vähentää entsyymien aktiivisuutta, näin iho ei rikkoudu
- 3) Säilyttää luonnollisen pH tasapainon

TUOTEOMINAISUUDET

„ Kun käytin **Surround™** ihonsuojaa, ihoni kunto parani huomattavasti ja kipu lievittyi „

- Vähentää kipua ja ärsytystä
- Tarjoaa täyden ihonsuojan
- Lisää potilaan hyvinvointia
- Imee vuotoja
- Edistää paranemisprosessia
- Helppo käyttää

ERILAISIA KÄYTTÖTAPOJA

Surround™ ihonsuojaa voidaan käyttää suojaamaan erilaisia ihonkohtia, monissa tilanteissa, esim.

- PEG letkun juuressa
- Poistoletkujen juuressa
- Trachea kanyyleissa
- Subrapuubisissa katetreissa

„ Kun käytin ihonsuojaa, ihoni oli hyvin puhdas, ilman ihottumaa, ja se myös antoi tukea PEG letkulle. „

HELPPO KÄYTTÄÄ

Surround™ ihonsuoja voidaan asettaa helposti 4:ssä vaiheessa:



Puhdista ja kuivaa ympäröivä alue



Poista taustapaperi



Aseta **Surround™** ihonsuoja hoidettavalle alueelle ja paina avoin reuna toisen päälle sulkeaksesi renkaan



Paina ihonsuojaa hellästi reunoista, kunnes se on kiinnittynyt kunnolla

SURROUND™ IHONSUOJAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MM. SUOJAAMAAN PEG LETKUN JUURTA



Ennen **Surround™** ihonsuojan käyttöä iho on ärtynyt ja kipeä



Surround™ peittää kipeyteen alueen ja suoja sen täydellisesti

Hoitajan kommentti: "ihonsuoja mukautui ihoon loistavasti".